

شرکت دانش بینان دیده پرتو درمان

MEDISAVISION 



دفتر مرکزی
شرکت دیده پرتو درمان
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شادی بن بست
جویبار پلاک ۲۱
تلفن: ۰۱۷۳۵ - ۲۱

آدرس کارخانه:
ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان بیستم، پلاک ۲۱

www.kmtmed.com 
contact@kmtmed.com 
www.kmtmedshop.com 
Khosro Medisa Teb  

Rev: 02 - 01

مشخصات عملکردی

>80 Dk	نفوذیتی برای اکسیژن Oxygen permeability
30 %	محتوای آب Water Content
8.6 mm	شعاع احتنا Base Curve
14.8-15 mm	قطر Diameter
0 ± 0.25	قدرت لنز Power (D)

راهنمای علائم مورد استفاده

	صرف تنها با تجویز پزشک مجاز است
	در صورت تخریب بسته بندی استفاده نکرد.
	تاریخ تولید
	شعاع احتنا Base Curve
	قدرت لنز Power (D)
	قطر لنز Diameter
	شماره کاتالوگ محصول
	برای استفاده از دستور العمل استفاده نمایید.
	به هشدارهای دستورالعمل توجه نمایید.
	استریل شده با بخار
	سری ساخت
	تاریخ انقضای
	آدرس کارخانه
	شرایط دمایی ۱۵-۲۵°C
	یکبار قابل استفاده

دستور العمل استفاده

این بروشور برای اطلاع کاربران از نحوه استفاده لنزهای تماسی نرم (پانسمان) م迪سا ویژن، محصول تولیدی شرکت دانش بنیان دیده پرتو درمان درنظر گرفته شده است. لطفاً قبل از استفاده بروشور را مطالعه فرمایید.

نام محصول : لنز تماسی نرم (پانسمان)

مدل محصول : MVS01

مواد تشکیل دهنده : Silicone Hydrogel

درصد محتوای آب محصول : ۳۰٪

محلول نگهدارنده : Saline

مقدمه و کاربرد :

شرکت دانش بنیان دیده پرتو درمان کی از گروه شرکت های خسرو مدبی ساطب می باشد که برای اولین بار، با تکیه بر دانش فنی تیم طراحی خود، موفق به ساخت و طراحی لنزهای تماسی نرم (پانسمان) شده است. این لنز از پلیمرهای قابل انعطاف ساخته شده و طراحی آن به شکلی است که به راحتی روی قرنیه قرار می گیرد و اجرازه عبور اکسیژن را از بین مولکول های خود می دهد تا قرنیه چشم مانند سایر بافت های بدن چکار کمبوڈ اکسیژن نشود. لنزهای تماسی نرم مدبی سا ویژن حاوی ۳۰٪ آب و نفوذ پذیری به اکسیژن بالای ۸٪ می باشند.

این لنزها مطابق با دستور پزشک در طول دوره ۱ تا ۷ روز قابل استفاده می باشند. لنز تماسی پانسمان، روی سطح چشم قرار می گیرد تا از مناطق آسیب دیده استفاده نماید. لنز توسط چشم پزشک یا اپتومتریست وارد می شود و معمولاً تا زمان ملاقات بعدی در چشم باقی می ماند و بعد از چشم خارج می گردد.

محصولات تولیدی شرکت دانش بنیان دیده پرتو درمان، دارای تاییدیه های مراکز معتبر داخلی در خصوص برقراری الزامات ایمنی لنزهای تماسی نرم می باشد. این محصول به روش بخار، استریل گردیده است.



نحوه استفاده از لنز:

۱. قبل از دست زدن به لنز، همیشه دست ها را کاملًا با آب و صابون بشویید و خشک کنید. از مصرف صابون های معطر یا دارویی اجتناب کنید.
۲. لنز را از بسته بندی مخصوص خارج نمایید.
۳. لنز را در کف دست خود قرار دهید. مطمئن شوید که لنز را به درستی خارج کرده اید.

۴. قبل از استفاده، لنز خود را بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه خراشیدگی یا آسیب دیدگی آن را استفاده نکنید.
۵. با کمک انگشت اشاره لنز را بر روی چشم خود قرار دهید.
۶. برای خارج کردن لنز، از تمیز و خشک بودن دست خود اطمینان حاصل نمایید. سپس از انگشت اشاره خود استفاده کنید تا لنز را به سمت پایین بکشید.
۷. برای خارج کردن لنز آن را به سمت سفید چشم هدایت کرده و سپس آن را خارج نمایید. اگر لنز به سختی برداشته می شود از قطره مرطوب کننده مجدد استفاده کنید.

مراقبت از لنزهای تماسی نرم

- فقط از محصولات لنزهای تماسی نرم با پیروی از دستورالعمل استفاده کنید.
- در صورتی که هنگام استفاده از لنزهای تماسی نرم (پانسمان)، نیاز به مرطوب کردن و ضد عفونی داشتید، تنها از محلول های نگهداری معتبر استفاده کنید و از محلول های دیگر مانند آب شیر یا بطری یا براق برای شستشو با خیس کردن مجدد لنزها استفاده ننمایید.
- لطفاً لنزها را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید و تنها قبیل از استفاده آن ها را از بسته بندی خارج و استفاده نمایید.
- همیشه لنزهای را در پایان برنامه استفاده که توسط پزشک مراقبت از چشم شما تجویز شده است دور بیندازید.
- همیشه قبل از دست زدن به لنز دست ها را خوب با آب و صابون غیرمعطر بشویید.
- اجازه ندهید لوازم آرایشی، لوسيون ها، صابون ها، کرم های مواد معطر وارد چشم یا لنز شوند.
- هرگز از اشیاء نوک تیز یا ناخن انگشتان برای برداشتن لنزها از ظروف آنها یا چشم خود استفاده نکنید.

- هرگز از اشیاء نوک تیز یا ناخن انگشتان برای برداشتن لنزها از ظروف آنها یا چشم خود استفاده نکنید.

هشدارها و اقدامات احتیاطی

- ۱. پیروی نکردن از روش استفاده و نحوه استفاده توصیه شده توسط متخصص مراقبت از چشم، می تواند باعث افزایش خطر ابتلاء به عفونت های جدی چشم شود.
- ۲. استفاده از لنزها تنها با دستور پزشک امکان پذیر می باشد.
- ۳. اگر بسته بندی آسیب دیده یا باز شده است، از آن استفاده نکنید.
- ۴. از لنزهای یکبار مصرف روزانه بیش از یک روز یا هنگام خواب استفاده نکنید.

- ۵. در صورت داشتن هر یک از علائم زیر از لنزهای تماسی نرم استفاده ننمایید:

- آرزوی، التهاب، عفونت یا قرمزی در داخل یا اطراف چشم
- خشکی چشم (مایع اشک ناکافی)
- سلامت ضعیف که بر چشم ها تأثیر می گذارد به عنوان مثال سرماخوردگی و آنفولانزا

- هرگونه بیماری سیستمیک که بر چشم ها تأثیر می گذارد
- ۶. این افراد قبل از استفاده از لنز تماسی با چشم پزشک خود مشورت ننمایند:

- انجام ورزش های آبی
- در محیط های بیش از حد خشک یا دارای گرد و غبار

- استفاده از داروهای چشمی
- ۷. اگر هر یک از مشکلات زیر را تجربه کردید، فوراً لنزهای خود را بردارید

- سوزش چشم، خارش یا سایر دردهای چشم
- کاهش راحتی در مقایسه با استفاده قبلی

- ترشحات غیر معمول یا آبریزش زیاد از چشم
- قرمزی چشم

- خشکی شدید چشم یا خشکی مدام
- کاهش یا تاری دید

- رنگین کمان یا هاله در اطراف چراغ ها
- حساسیت به نور

- اگر هر یک از این علائم پس از برداشتن و قرار دادن لنز جدید ادامه یافت، لنز را بردارید و با چشم پزشک خود تماس بگیرید. این علائم در صورت نادیده گرفتن می تواند منجر به آسیب های جدی تری شود.

- ۸. از محلول های ضد عفونی غیر معتبر استفاده نکنید زیرا سبب تغییر ابعاد و ویژگی های لنز می گردد.